

## NÁVOD K POUŽITÍ

### VAKUOVÝ ČISTIČ UŠÍ

#### SOUČÁSTI VÝROBKU

Vakuový čistič uší

4 silikonové nástavce k opětovnému použití

Čisticí štěteček



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zařízení je napájeno 2 AA bateriemi, nejsou součástí výrobku.

#### MONTÁŽ

Zvedneme víčko, otevřeme otvor, do něhož vložíme baterie, a zavřeme otvor víčkem.

Na hubičku přístroje navlékneme silikonový nástavec, dáváme pozor, aby nedošlo k poškození nástavce.

#### POUŽITÍ

Po pevném a opatrném umístění silikonového nástavce na hubičku přístroje zapneme zařízení a přiložíme ho k uchu. Hubičku s nástavcem vložíme max. 3 mm hluboko do ucha. Odstraníme ušní špínu také na vnějších částech ucha. V případě, že se objeví pískání v uchu, přístroj z ucha okamžitě vyjmeme.

Ucho čistíme opakovaným krouživým pohybem, dokud neodstraníme většinu špíny. Postup trvá půl až pět minut. Pokud by čištění trvalo déle, poradíme se se svým lékařem.

Po úspěšném vyčištění ucha sejmeme silikonový nástavec z hubičky. Sterilizujeme ho nebo vyhodíme.

#### ÚDRŽBA

Po odstranění nástavce z hubičky ho namočíme do alkoholu nebo opatrně na 5 až 10 min do vroucí vody.

Víčko hlavní jednotky otočíme po směru hodinových ručiček a odstraníme ho. Ujistíme se o pevném uzavření otvoru s bateriemi. Špínu uvnitř přístroje omyjeme vlažným hadrem. Hlavní jednotku nepotápíme do vody. Filtr očistíme přiloženým štětečkem.

#### DŮLEŽITÉ

- Nepoužíváme současně nové a staré baterie.

- Výrobek nepoužíváme v blízkosti vody či vznětlivých látek. Vyhnete se manipulaci mokřýma rukama, tělem či kontaktu s vodou.
- Čistíme vlhkým hadrem.
- K údržbě nepoužíváme agresivní prostředky.
- Nenamáčíme do tekutin.
- V případě, že přístroj po delší dobu nepoužíváme, odstraníme baterii.
- Baterie nevystavujeme vysoké teplotě nebo přímému slunečnímu záření.
- Skladujeme na suchém místě bez prachu.
- Dodržujeme předpisy o třídění odpadu.