

NÁVOD K POUŽITÍ

SAFE PICK, ELEKTRICKÝ ODSTRAŇOVAČ UŠNÍHO MAZU

SOUČÁSTI ZBOŽÍ:

- odstraňovač,
- pouzdro,
- 2 nástavce,
- čisticí štěteček.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- zdroj napájení: AAA baterie (není součástí zboží),
- materiál: ABS,
- rozměry pouzdra: 11,8 × 5,6 × 3,1 cm,
- rozměry zařízení: 13 × 2,5 cm,
- hmotnost: 32 g.



OVLÁDÁNÍ A POUŽITÍ

Zařízení SafePick představuje bezpečný způsob čištění uší bez použití vatových tyčinek či jiných nebezpečných pomůcek.

Instalaci baterií, ovládání a použití výrobku provedeme dle postupu zobrazeného na níže uvedených obrázcích:



1. Na hlavici zařízení připojíme nástavec.
2. Odstraníme kryt místa na baterii a vložíme správně orientovanou baterii.
3. Místo na baterii zavřeme krytem. Zařízení je připraveno k použití.
4. Zapneme tlačítkem zapnout/vypnout.

5. Přístroj opatrně vložíme do ucha a vysajeme ušní maz. Přístroj vyjmeme z ucha a vypneme tlačítkem zapnout/vypnout.
6. Odstraníme nástavec, pomocí přiloženého štětečku vyčistíme hlavici zařízení. Nástavec můžeme umýt vodou.

UPOZORNĚNÍ


- Zařízení používáme velmi opatrně. Zasuneme-li ho do ucha příliš hluboko, můžeme ucho zranit či nevratně poškodit.
- Přístroj vždy skladujeme v přiloženém pouzdro.
- Po každém použití očistíme.
- Neobsahuje žádné součásti, které bychom byli schopni opravit sami. Žádným způsobem nedemontujeme.
- Nevystavujeme vodě ani vlhkosti.
- Děti by přístroj neměly používat sami.
- Ucítíme-li bolest či jakékoli nepohodlí, zařízení okamžitě přestaneme používat.
- V případě potřeby se o používání přístroje předem poradíme s lékařem.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 měsíců. Lze ji uplatnit v případě výměny zboží či vrácení peněz u společnosti DFMU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia pomocí kontaktu v pravém spodním rohu. Do zprávy je

třeba uvést číslo objednávky a datum nákupu.
Životnost výrobku je 24 měsíců od data přijetí zboží.



	<p>Symbol likvidace a recyklace dle směrnic OEEZ. Symbol OEEZ je na výrobku v souladu se Směrnicí EU 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která je určena k prevenci nevhodného odkládání a podpoře opětovného používání a recyklování.</p>
---	--