

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### VÁKUUMOS FÜLTISZTÍTÓ

#### TARTOZÉKOK

Vákuumos fültisztító

4 szilikon toldatot tartalmaz, többszöri használatra alkalmas

Tisztítókefét tartalmaz



#### MŰSZAKI JELEMZŐI

A készülék működéséhez 2 AA elemre van szüksége (a készlet nem tartalmazza).

#### TELEPÍTÉSE

Az elemek telepítéséhez nyissa ki a fedelet és tegye be az elemeket. Ha az elemek a helyükön vannak, csukja be a fedelet.

Egyszerűen csúsztassa a szilikon toldatot a készülék fejére.

#### HASZNÁLAT

Rögzítse egyszerűen a tiszta szilikon toldatot a készülék fejére. Ügyeljen arra, hogy a telepítés során ne sértse meg a szilikon toldatot.

Kapcsolja be a készüléket és tegye a fülébe. Ne helyezze a toldatot 3 mm-nél nagyobb mélységben a fülcsatornába. Ne felejtse el eltávolítani a szennyeződést a fül látható részein is. Ha a fülben elkezd sípolni, azonnal távolítsa el a készüléket füléből.

Ismételje meg a lassú körkörös mozdulatot, és folytassa a tisztítást, amíg a legtöbb szennyeződést el nem távolította.

Az eljárás általában 30 másodperctől 5 percig tart. Ha az eljárás tovább tartana, forduljon orvosához.

Miután a befejezte füle tisztítását, távolítsa el a szilikon toldatot az eszköz fejéről, és sterilizálja azt a tisztítási utasításokban leírtak szerint, vagy dobja el.

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Húzza le a szilikon toldatot az eszköz fejéről. Tisztítsa meg úgy, hogy alkoholba vagy forró vízben áztassa minden használat után, 5-től 10 percig. Ügyeljen a forró vízzel való tisztításakor.

Az eszköz fejét úgy távolítsa el, hogy forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza ki a főegységből.

A főegység tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy az elemtartó fedele szilárdan zárva van. Nedves ruhával távolítsa el a szennyeződések a készülék belsőjéből. Ne merítse a főegységet vízbe!

A szűrőt a mellékelt tisztítókefével tisztítsa meg.

#### FONTOS

- Ne használjon új és régi elemet egyszerre.
- Ne használja a terméket víz vagy gyúlékony anyagok közellétében, nedves kézzel vagy testtel vagy vízzel érintkezve
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa
- Ne használjon tisztítószereket
- Ne merítse folyadékba
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket
- Száraz, pormentes helyen tárolja
- Kérjük, vegye figyelembe az újrahajszósításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek.

Az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló rendelettel (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 55/2015) tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy új elektromos és elektronikus berendezések vásárlásakor a régi elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nálunk hagyhatja.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak meg kell egyezniük a felhasznált elektromos és elektronikus berendezésekkel, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai száma megegyezik az elektromos és elektronikus berendezéseknek az elektromos és elektronikus berendezések osztályába történő felhasználása és osztályozása céljából szállított darabszámmal.