

## UTASÍTÁS

### SAFE PICK ELEKTROMOS FÜLSÍR ELTÁVOLÍTÓ

#### CSOMAG TARTALMA

- Fülzsír eltávolító
- Tároló doboz
- 2 x fej
- Tisztítókefe

#### MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: AAA elem (nem mellékelte)
- Anyag: ABS
- Tároló doboz mérete: 11,8 x 5,6 x 3,1 cm
- Készülék mérete: 13 x 2,5 cm
- Súly: 32g



#### HASZNÁLAT

A SafePick elektromos fülzsír eltávolító biztonságos módszer a fülzsír eltávolítására pamut fülpálcika vagy más potenciálisan veszélyes eszköz használata nélkül.

Kövesse az alábbi lépéseket az elem behelyezéséhez és a készülék használatához:



1. Helyezze a fejet a készülék fúvókájára.
2. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét és helyezze be az elemet - ügyeljen a polaritásra.
3. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét. A készülék használatra kész.

4. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
5. Óvatosan helyezze be a készüléket a fülébe, és segítségével távolítsa el a fülzsírt. Ha végeztet, húzza ki a készüléket a hallójáratából, és a bekapcsológomb megnyomásával kapcsolja ki.
6. Távolítsa el a fejet, és a mellékelt tisztítókefével tisztítsa meg a készülék fúvókáját. A fejet vízzel tudja megtisztítani.



#### FIGYELMEZTETÉS

- Legyen óvatos a készülék használatakor. Ha túl mélyen helyezi a hallójáratába, ez maradandó halláskárosodást okozhat.
- Ha nem használja a készüléket, mindig tárolja a mellékelt tároló dobozban.
- Minden használat után tisztítsa meg.
- A készüléknek nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészei. Ne szerelje szét.
- Ne tegye ki víznek vagy nedvességnek.
- Gyermekek nem használhatják egyedül a készüléket.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- A készülék használata előtt konzultáljon orvosával, ha bármilyen fennálló állapot van.

## GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



 	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--