


Instrukcja Obsługi - Oksymetr

UŻYTKOWANIE:

Włóż dwie baterie od spodu.

UWAGA: Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu.

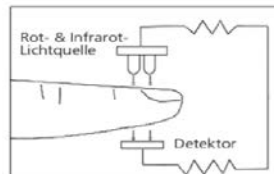

1. Otwórz klapy
2. Włóż palec do środka urządzenia - w taki sposób, aby czujnik był wciąż widoczny pod czubkiem palca.
3. UWAGA: Upewnij się, że palec znajduje się po środku, a paznokieć jest nad palcem. Aby uzyskać dokładny pomiar, należy użyć palca wskazującego, środkowego lub serdecznego. Zbyt niska temperatura palca lub zbyt grube oraz zbyt cienkie palce mogą zaburzyć pomiar.
4. Włącz urządzenie za pomocą znajdującego się z przodu przycisku.
5. W trakcie pomiaru palec nie może się ruszać.
6. Odczytaj wartości z wyświetlacza. Urządzenie pokaże poziom tlenu we krwi (SpO2%) oraz tętno (BPM).
7. Po zakończeniu pomiaru można wyjąć palec z urządzenia. Po 5 sekundach urządzenie automatycznie się wyłączy.
8. Tryb wyświetlania można zmienić poprzez naciśnięcie przycisku.

UWAGA!

- To urządzenie nie jest podstawą do podjęcia stosownego leczenia. Pomaga ono tylko w postawieniu przybliżonej diagnozy. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować tego urządzenia w przypadku obrzęków, ran otwartych i w miejscu podrażnień skóry.

- Wszelki lakier do paznokci lub innego rodzaju makijaż musi zostać usunięty. Paznokcie nie powinny także być zbyt długie.

Tętno (BPM)

MĘŻCZYŹNI:

Wiek	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Bardzo Dobre	<79	<81	<83	<87	<86	<88
Dobre	79	81-89	83-96	87-97	86-97	88-96
Powyżej Średniej	90-99	90-99	97-103	98-105	98-103	97-103
Średnie	100-105	100-107	104-112	106-116	104-112	104-113
Poniżej Średniej	106-116	108-117	113-119	117-122	113-120	114-120
Słabe	117-128	118-128	120-130	123-132	121-129	121-130
Bardzo Słabe	>128	>128	>130	>130	>129	>130

KOBIETY:

Wiek	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Bardzo Dobre	<85	<88	<90	<94	<95	<90
Dobre	85-98	88-99	90-102	94-104	95-104	90-102
Powyżej Średniej	99-108	100-111	103-110	105-115	105-112	103-115
Średnie	109-117	112-119	111-118	116-120	113-118	116-122
Poniżej Średniej	118-126	120-126	119-128	121-129	119-128	123-128
Słabe	127-140	127-138	129-140	130-135	129-139	129-134
Bardzo Słabe	>140	>138	>140	>135	>139	>134

Poziom tlenu we krwi (SpO2%)

SpO2 %

Przedział	Wynik
< 64	Urządzenie nie działa prawidłowo
65 - 79	Bardzo Niskie
80 – 91	Niskie
92 – 94	W granicach normalnego poziomu
95 – 100	Normalne
> 100	Urządzenie nie działa prawidłowo