

INSTRUKCJE OBSŁUGI

KOREKTOR POSTAWY

OPIS

Korektor postawy pomaga utrzymać zdrową i zrównoważoną postawę ciała. Zalety:

- prawidłowa postawa ciała
- trzyma twoją szyję wyprostowaną
- rozciąga ramiona i utrzymuje klatkę piersiową w pozycji pionowej
- wspiera pewność siebie i przekonującą mowę ciała



NOSZENIE I REGULACJA SZELKI

Dopasuj szelki podtrzymujące plecy do własnego ciała, dopasowując paski na rzepy.



Dopasuj szelki [1] do swojego wzrostu i dopasuj korektor do swojego ciała.

Zapnij pasek z rzepami wokół klatki piersiowej [2], w sposób zapewniający wygodne dopasowanie, a jednocześnie wspierający prawidłową postawę ciała.

Dodatkowe korekty szelki podtrzymującej plecy można wprowadzić za pomocą bocznych pasów z rzepami [3], które można zamocować z powrotem na pasie.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku urazów klatki piersiowej, ramion lub innych urazów kręgosłupa, nie należy używać opaski podtrzymującej do czasu całkowitego wyzdrowienia z tych urazów.

Nie należy nadmiernie napinać szelki na rzepy, ponieważ może to spowodować trudności w oddychaniu.

Umyj ręcznie w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem. Pozwól wyschnąć na powietrzu.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

