

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA USZU

#### KOMPONENTY

Urządzenie do czyszczenia uszu

4 końcówki silikonowe do wielokrotnego użytku

Szczotka do czyszczenia urządzenia



#### DANE TECHNICZNE

Aby używać z urządzenia, należy włożyć 2x baterie AA (nie dołączone).

#### INSTALACJA

Aby zainstalować baterie, należy przesunąć w dół pokrywę baterii i umieścić ich we właściwej pozycji. Po

włożeniu baterii, należy umieścić pokrywę z powrotem i przesunąć ją w górę.

Aby zainstalować silikonową końcówkę, wystarczy umieścić ją na dyszy jednostki głównej.

#### UROCHOMIENIE I UŻYWANIE

Należy przymocować czystą końcówkę silikonową, mocno dociskając ją do dyszy jednostki głównej. Uważaj, aby nie uszkodzić końcówki silikonowej przy wkładaniu.

Naciśnij przełącznik do pozycji ON. Włóż urządzenie do ucha. NIE wkładać dyszy więcej niż 3 mm (1/8 cala) do przewodu słuchowego. Skoncentruj się również na usuwaniu wilgoci/debrisów znajdujących się w widocznym zewnętrznym obszarze przewodu słuchowego. Jeśli słychać gwizdek o wysokim natężeniu dźwięku, należy natychmiast wyjąć i pozbyć się silikonowej końcówki.

Należy powtarzać, aż do momentu, gdy większość wilgoci/debris zostanie usunięta. Proces ten trwa zazwyczaj od 30 s do 5 min. Jeśli potrwa to dłużej, należy skontaktować się z lekarzem.

Po zakończeniu procesu należy wyjąć końcówkę silikonową z dyszy i wysterylizować w sposób opisany w instrukcji czyszczenia lub wyrzucić ją do pojemnika.

#### CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Należy wyciągnąć, aby usunąć końcówkę silikonową. Należy wysterylizować końcówki pomiędzy kolejnymi zabiegami, mocząc je w alkoholu lub zanurzając we

wrzącej wodzie na 5 do 10 minut. Należy zachować ostrożność podczas posługiwania się gorącymi cieczami.

Należy przekręcić i pociągnąć pokrywę urządzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć. Przed czyszczeniem urządzenia głównego należy upewnić się, że pokrywa baterii jest zamknięta. Zanieczyszczenia z wnętrza należy wycierać miękką ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia głównego w cieczy! Aby oczyścić filtr, użyj szczotki czyszczącej.

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy mieszać nowych i zużytych baterii.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami albo w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach ściernych.
- Nie należy zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Należy przechowywać w suchym i niezapylnym miejscu.
- Przy recyklingu należy przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska.