

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOMETR BEZDOTYKOWY INFRAHEALTH

KOMPONENTY


Termometr bezdotykowy Infrahealth



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Metoda pomiaru: precyzyjny pomiar bezdotykowy
- Odległość pomiarowa: 3 – 5 cm
- Moc: DC 3,0V (2x AAA baterie - nie dołączone)
- Rozmiar: 190 mm × 40 mm × 40 mm
- Waga: 67 g
- Automatyczne wyłączenie: po 15 sekundach
- Zakres tolerancji:
 - 32° C – 34.9° C (± 0.3° C)
 - 35° C – 42° C (± 0.2° C)
 - 42.1° C – 42.5° C (± 0.3° C)

WYŚWIETLACZ

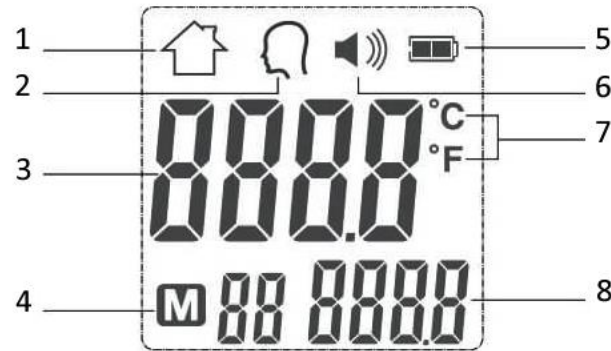

- 1 – Temperatura powierzchniowa/zewnętrzna
- 2 - Temperatura ciała
- 3 - Odczyt cyfrowy
- 4 - Wskazanie pomiarowe
- 5 - Wskaźnik naładowania baterii
- 6 - Wskaźnik dźwiękowy
- 7 - Temperatura ° C/° F
- 8 - Zmierzona i przechowywana temperatura

OPERACJA POMIAROWA

Termometr bezdotykowy Infrahealth oferuje bezstykowy precyzyjny odczyt temperatury ciała i przedmiotów.

Do pomiaru wymagane są dwie baterie AAA (nie dołączone do zestawu). Należy je umieścić w slocie z tyłu produktu.

Temperatura ciała mierzona jest poprzez skierowanie termometru na czoło w odległości 3-5 centymetrów i przytrzymanie przycisku SCAN.

Każda odmierzona temperatura jest automatycznie zapisywana. Naciśnięcie przycisku + lub - powoduje wyświetlenie poprzednio zmierzonych temperatur.

Krótkie naciśnięcie przycisku MODE powoduje przełączenie pomiędzy trybem pomiaru temperatury obiektu i temperatury ciała.

Termometr posiada ustawienia domyślne. Można je zmienić za pomocą menu funkcji:

Funkcja F1 - zmiana skali pomiarowej: aby zmienić skalę, przytrzymaj przycisk MODE przez dwie sekundy. Gdy pojawi się F1, naciśnij + dla skali Celsjusza i - dla skali Fahrenheita.

Funkcja F2 - ostrzeżenie o temperaturze: domyślnym ustawieniem ostrzegawczym jest 38° C. Aby zmienić tę wartość należy nacisnąć przycisk MODE przez dwie sekundy. Gdy pojawi się F1, ponownie naciśnij krótko przycisk MODE. Gdy wyświetlana jest wartość, można ją zmienić za pomocą przycisków + i -.

Funkcja F3 - kompensacja temperatury: jeśli pomiar odbiega od innych urządzeń pomiarowych, temperaturę tę można skorygować o wyświetlaną temperaturę. Stosując tę samą procedurę, umieścić w F3 i należy użyć przycisków + i -, aby skorygować wartość w zakresie od -3° C do +3° C.

Funkcja F4 - Wyciszenie/ aktywacja dźwięku.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem należy upewnić się, że czujnik i sonda są czyste.
- Jeśli termometr ma być używany przy różnych temperaturach powietrza (zewnątrznego i wewnętrznego), różnice temperatur są duże, dlatego należy poczekać do 30 minut za każdym razem, gdy środowisko się zmieni.
- Jeśli mierzona była wysoka temperatura przedmiotu, należy odczekać do 30 minut przed pomiarem temperatury ciała.
- Nie należy mierzyć temperatury po prysznicu, rekreacji i poceniu się, stosowaniu produktów kosmetycznych itp. w celu uzyskania prawidłowych wyników.
- Pomiaru temperatury należy dokonywać przez co najmniej 30 minut po posiłku, prysznicu lub wysiłku fizycznym.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami albo w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach ściernych.
- Nie należy zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. • Nie należy mieszać nowych i zużytych baterii.
- Należy przechowywać w suchym i niezapyłonym miejscu.
- Przy recyklingu należy przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska.