

INSTRUKCJE OBSŁUGI

URZĄDZENIE DO USUWANIA WOSKOWINY SAFE PICK

KOMPONENTY

- Urządzenie do usuwania woskowiny
- Pudełko do przechowywania
- 2 × nasadka
- Szczoteczka do czyszczenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: Bateria AAA (brak w zestawie)
- Materiał: ABS
- Rozmiar pudełka do przechowywania: 11,8 × 5,6 × 3,1 cm
- Rozmiar urządzenia: 13 × 2,5 cm
- Waga: 32 g



SPOSÓB UŻYWANIA

Urządzenie do usuwania woskowiny SafePick to bezpieczny sposób na usunięcie woskowiny bez użycia patyczków do uszy lub innych potencjalnie niebezpiecznych przyborów.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować baterię i korzystać z urządzenia:



1. Umieść nasadkę na dyszy urządzenia.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii i włóż baterię – uważaj na polaryzację.
3. Zamknij pokrywę komory baterii. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
5. Ostrożnie włóż urządzenie do ucha i wyczyść woskowinę. Po zakończeniu wyjmij urządzenie z przewodu słuchowego i wyłącz je, naciskając przycisk zasilania.
6. Zdejmij nasadkę i wyczyść dyszę urządzenia za pomocą dołączonej szczoteczki do czyszczenia. Nasadkę można czyścić wodą.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia. Włożenie go zbyt głęboko do przewodu słuchowego może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Zawsze przechowuj urządzenie w dołączonym pudełku do przechowywania, gdy nie jest używane.
- Wyczyść po każdym użyciu.
- Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie należy go demontować.
- Nie narażać na działanie wody lub wilgoci.
- Dzieci nie powinny samodzielnie używać tego urządzenia.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, natychmiast przestań korzystać z urządzenia.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek wcześniejsze schorzenia.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFCU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.