


Manualul utilizatorului - Oximetru

FOLOSIRE:

Introduceți două baterii în partea inferioară.

ATENȚIE: Vă rugăm să vă asigurați că bateriile sunt poziționate corect, după cum este indicat pe dispozitiv.

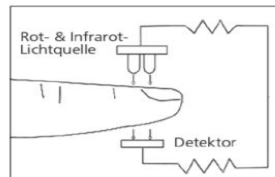

1. Deschideți clema
2. Introduceți un deget în dispozitiv la o adâncime suficientă astfel încât senzorul să se situeze pe acesta, apoi închideți clema.

ATENȚIE: Asigurați-vă că degetul este centrat în dispozitiv, iar unghia este deasupra. Pentru a beneficia de măsurători corecte, vă rugăm să utilizați degetul arătător, pe cel mijlociu sau cel inelar. Temperatura prea scăzută a degetelor sau degetele prea groase sau prea subțiri pot cauza măsurători inexacte.

3. Apăsăți butonul de pornire de pe fața dispozitivului.
4. Mențineți degetul fix în timpul măsurătorii.
5. Citiți valoarea de pe afișaj. Dispozitivul indică valoarea oxigenului din sânge (SpO2%) și pulsul (BPM).
6. Atunci când s-a încheiat măsurătoarea, puteți îndepărta dispozitivul de pe deget. După 5 secunde, acesta se va închide automat.
7. Apăsăți butonul pentru a schimba modul de afișare a dispozitivului.

ATENȚIE!

- Dispozitivul nu este recomandat pentru tratamente. Acesta servește doar la diagnosticarea aproximativă. Pentru probleme medicale serioase, consultați un medic.
- Nu folosiți dispozitivul pe erupții cutanate, răni sau pe pielea iritată.
- Oja de unghii sau alte asemenea produse trebuie îndepărtate. Unghiile nu trebuie să fie foarte lungi.

Garanție

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--

Pulsul (BPM)

BĂRBAȚI:

Vârsta	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Foarte bun	<79	<81	<83	<87	<86	<88
Bun	79	81-89	83-96	87-97	86-97	88-96
Peste medie	90-99	90-99	97-103	98-105	98-103	97-103
Mediu	100-105	100-107	104-112	106-116	104-112	104-113
Sub medie	106-116	108-117	113-119	117-122	113-120	114-120
Rău	117-128	118-128	120-130	123-132	121-129	121-130
Foarte rău	>128	>128	>130	>130	>129	>130

FEMEI:

Vârsta	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Foarte bun	<85	<88	<90	<94	<95	<90
Bun	85-98	88-99	90-102	94-104	95-104	90-102
Peste medie	99-108	100-111	103-110	105-115	105-112	103-115
Mediu	109-117	112-119	111-118	116-120	113-118	116-122
Sub medie	118-126	120-126	119-128	121-129	119-128	123-128
Rău	127-140	127-138	129-140	130-135	129-139	129-134

Foarte rău	>140	>138	>140	>135	>139	>134
------------	------	------	------	------	------	------

Nivelul oxigenului din sânge (SpO2%)

SpO2 %	
Interval	Stare
< 64	Dispozitivul nu funcționează corespunzător
65 - 79	Grav
80 - 91	Foarte grav
92 - 94	Între limitele normale
95 - 100	Normal
> 100	Dispozitivul nu funcționează corespunzător