

INSTRUCȚIUNI

Aparat cu Vacuum pentru Curățarea Urechilor

COMPONENTE

Aparat cu Vacuum pentru Curățarea Urechilor

4 vârfuri de silicon reutilizabile

Perie de curățat



SPECIFICAȚII TEHNICE

Pentru funcționarea aparatul introduceți 2 baterii AA (nu sunt incluse) respectând polaritatea corectă.

INSTALARE

Pentru a instala bateriile, glisați în jos capacul slotului cu baterii și scoateți-l. După introducerea bateriilor, plasați capacul înapoi și glisați-l în sus.

Pentru a instala un vârf de silicon reutilizabil, pur și simplu puneți-l pe duza unității principale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Atașați un vârf de silicon curat prin apăsarea fermă a vârfului pe duza unității principale. Aveți grijă să nu deteriorați vârful de silicon la introducere.

Apăsați comutatorul în poziția ON.

Introduceți dispozitivul în ureche. NU introduceți duza mai mult de 3 mm (1/8 inch) în canalul urechii.

Concentrați-vă și pe îndepărtarea umidității / cerii situate și pe zona vizibilă exterioară a canalului urechii. Dacă se aude un sunet fluierător înalt, îndepărtați și aruncați vârful de silicon.

Repețiți până când cea mai mare parte a umidității / cerii sunt îndepărtate. Procesul durează de obicei de la 30 de secunde până la 5 minute. În cazul în care va dura mai mult, vă rugăm să contactați medicul dumneavoastră.

Odată ce aspirația este completă, scoateți vârful de silicon din duză și sterilizați-l, conform descrierii din instrucțiunile de curățare, sau aruncați-l.

CURĂȚIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Trageți pentru a îndepărta vârful de silicon. Dezinfectați vârful de silicon după fiecare utilizare prin înmuiere sau frecarea cu alcool medical sau prin scufundarea vârfului de silicon în apă clocotită timp de 5 - 10 minute.

Aveți grijă când manipulați cu lichidele fierbinți.

Rotiți și trageți capacul unității în sens invers acelor de ceasornic pentru a îl scoate. Asigurați-vă că compartimentul bateriilor este închis înainte de a curăța

unitatea principală. Ștergeți murdăria din interior cu o cârpă moale. Nu scufundați unitatea principală în apă! Curățați filtrul cu peria de curățat.


IMPORTANT

- Nu amestecați bateriile noi cu cele utilizate în compartimentul pentru baterii.
- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați aparatul în lichid.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
- A se depozita într-un loc uscat, fără praf.
- Respectați reglementările de mediu în vigoare pentru reciclare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
---	--