

NAVODILA ZA UPORABO

VAKUUMSKI ČISTILEC UŠES

KOMPONENTE

Vakuumski čistilec ušes

4 silikonski nastavki za večkratno uporabo

Krtačka za čiščenje



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Za delovanje naprave sta potrebni 2X AA bateriji (nista vključeni v komplet).

NAMESTITEV

Za namestitev baterij je potrebno odpreti pokrov in ga odstraniti. Ko sta bateriji na svojem mestu, zaprite pokrov.

Silikonski nastavek preprosto nataknete na šobo na glavni napravi.

UPORABA

Pritrdite čisti silikonski nastavek tako, da nastavek trdno pritisnete na šobo glavne naprave. Bodite previdni, da se med nameščanjem silikonska konica ne poškoduje.

Vključite napravo in jo namestite v uho. Šobe s silikonskim nastavkom ne vstavite več kot 3 mm globoko v ušesni kanal. Ne pozabite na odstranitev ušesne umazanije tudi na zunanjih vidnih delih ušesa. V primeru piskanja v ušesu, tako odstranite silikonski nastavek iz ušesa.

Ponavljajte počasne krožne gibe in nadaljujte s čiščenjem, dokler ne odstranite večino umazanije. Postopek običajno traja od 30 s do 5 min. Če bi postopek trajal dlje časa, se prosim posvetujte s svojim zdravnikom.

Ko je čiščenje končano, odstranite silikonski nastavek iz šobe in jo sterilizirajte, kot je opisano v navodilih za čiščenje ali zavrtite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Potegnite silikonski nastavek s šobe. Nastavek očistimo tako, da ga po vsaki uporabi namočimo v alkohol oz. ga potopimo v vrelo vodo za 5 do 10 minut. Bodite previdni pri čiščenju z vročo vodo.

Zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca ter potegnite pokrov glavne enote, da ga odstranite. Pred čiščenjem glavne enote se prepričajte, da je predal za baterije čvrsto zaprt. Uporabite vlažno krpo, da bi odstranili umazanijo v notranjosti naprave. Ne potaplajte glavne enote v vodo!

Filter očistite s prileženo s krtačko za čiščenje.

POMEMBNO

- Ne uporabljajte novih in starih baterij istočasno.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini vode ali vnetljivih snovi, z mokrimi rokami ali telesom ali v stiku z vodo.
- Napravo očistite z vlažno krpo.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih izdelkov.
- Ne potaplajte v tekočino.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte visoki temperaturi ali neposredni sončni svetlobi.
- Hranite v suhem prostoru brez prahu.
- Prosimo, da upoštevate predpise, ki veljajo za ločevanje odpadkov.

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.