

NAVODILA

ELEKTRIČNI ODSTRANJEVALEC UŠESNEGA MASLA SAFE PICK

VSEBINA PAKETA

- Odstranjevalec ušesnega masla
- Škatla za shranjevanje
- 2 × nastavek
- Krtačka za čiščenje

TEHNIČNE LASTNOSTI

- Napajanje: AAA baterija (ni vključena)
- Material: ABS
- Velikost škatle za shranjevanje: 11,8 × 5,6 × 3,1 cm
- Velikost naprave: 13 × 2,5 cm
- Teža: 32 g



UPORABA

Električni odstranjevalec ušesnega masla SafePick je varen način za odstranjevanje ušesnega masla brez uporabe bombažnih palčk za ušesa ali drugih potencialno nevarnih pripomočkov.

Sledite naslednjim korakom za namestitev baterije in uporabo naprave:



1. Namestite nastavek na šobo naprave.
2. Odstranite pokrov razdelka za baterijo in vstavite baterijo – upoštevajte polarnost.
3. Zaprite pokrov razdelka za baterijo. Naprava je zdaj pripravljena za uporabo.

4. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo.
5. Previdno vstavite napravo v uho in očistite ušesno maslo. Ko končate, izvlecite napravo iz ušesnega kanala in jo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.
6. Odstranite nastavek in očistite šobo naprave s priloženo krtačko za čiščenje. Nastavek je mogoče očistiti z vodo.

OPOZORILA


- Bodite previdni pri uporabi naprave. Če jo vstavite pregloboko v ušesni kanal, lahko povzroči trajno poškodbo sluha.
- Napravo vedno shranite v priloženo škatlo za shranjevanje, ko ni v uporabi.
- Očistite po vsaki uporabi.
- Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam. Ne razstavljajte.
- Ne izpostavljajte vodi ali vlagi.
- Otroci sami ne smejo uporabljati naprave.
- Če izkusite nelagodje ali bolečino, takoj prenehajte uporabljati napravo.
- Če imate kakršnekoli obstoječe zdravstvene težave, se pred uporabo pripomočka posvetujte z osebnim zdravnikom.

GARANCIJA

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo lahko pri podjetju DFVU d.o.o. družba za posredništvo, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, ki poskrbi za zamenjavo

izdelka oziroma za vračilo denarja. Pošljite nam številko vašega naročila in datum nakupa na elektronsko pošto, ki vam je na voljo ob kliku na naš logotip v spodnjem desnem kotu. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.



	Simbol za odstranjevanje in recikliranje OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimerne odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) kupca obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.